

1 Identifica las tres piezas de tu careta


(A) liga



(B) correa



(C) careta

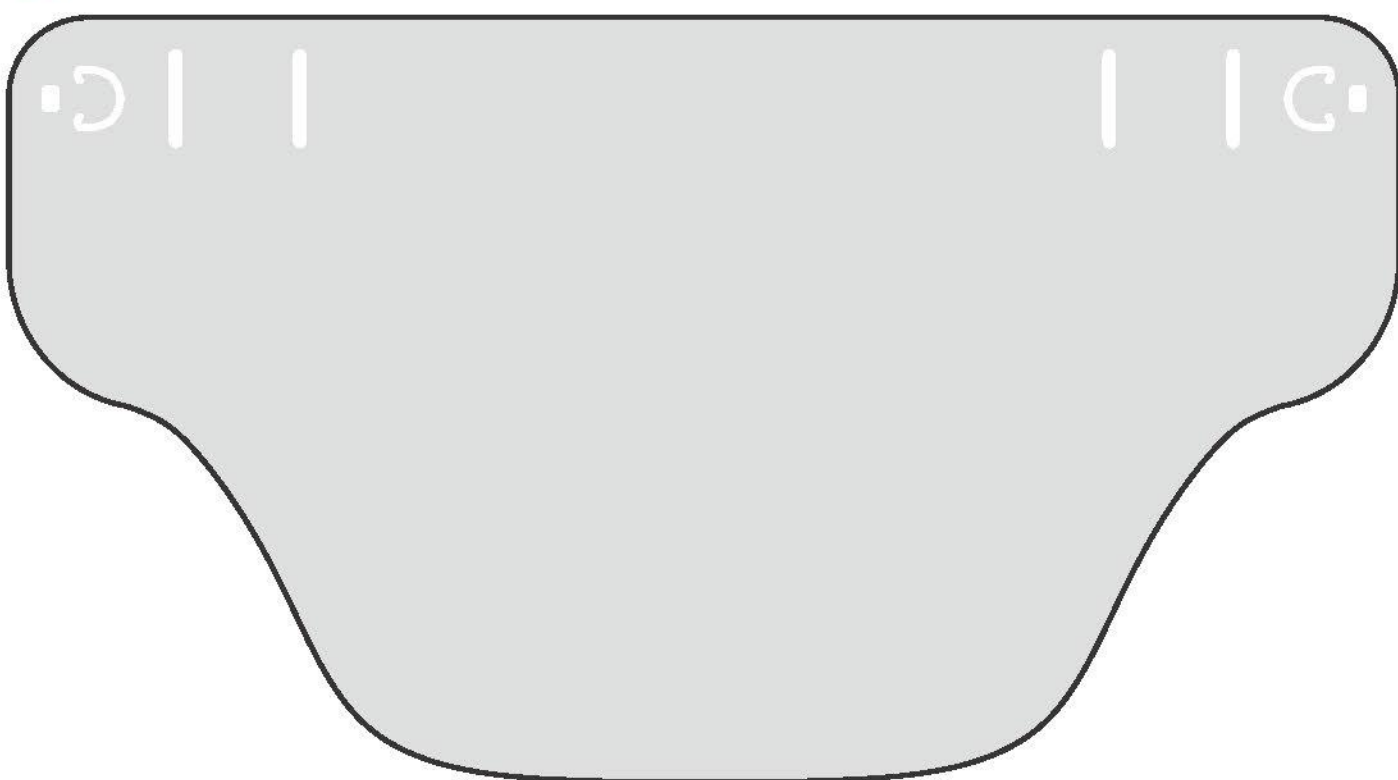



¡NOTAS IMPORTANTES!

El equipo debe ser desinfectado antes de usarse por primera vez.

El equipo está hecho de PVC, por lo que es resistente al cloro para su desinfección.

2 Arma la careta con la correa

cruza la correa por las aperturas y fíjala con las pestañas en arco

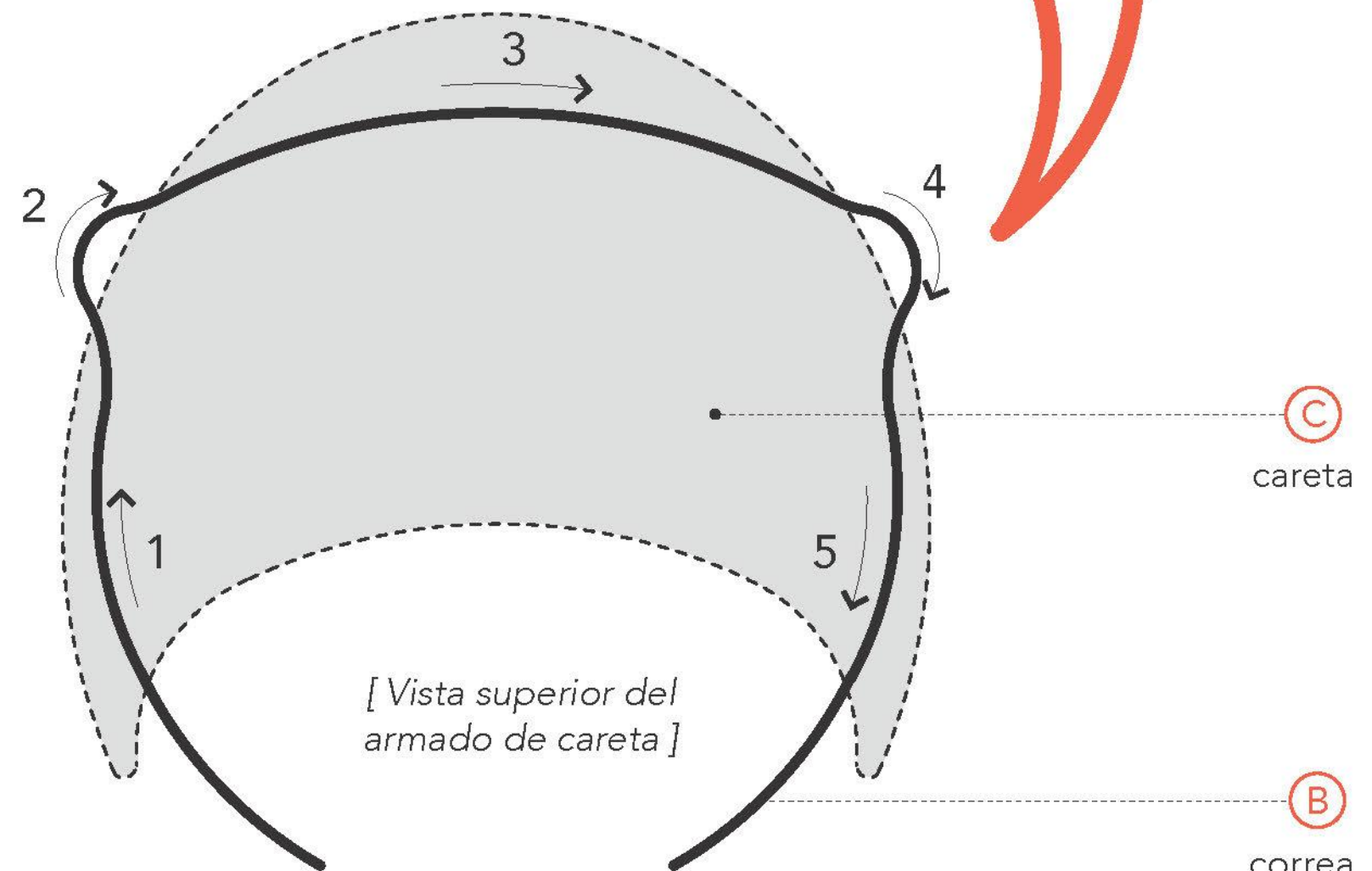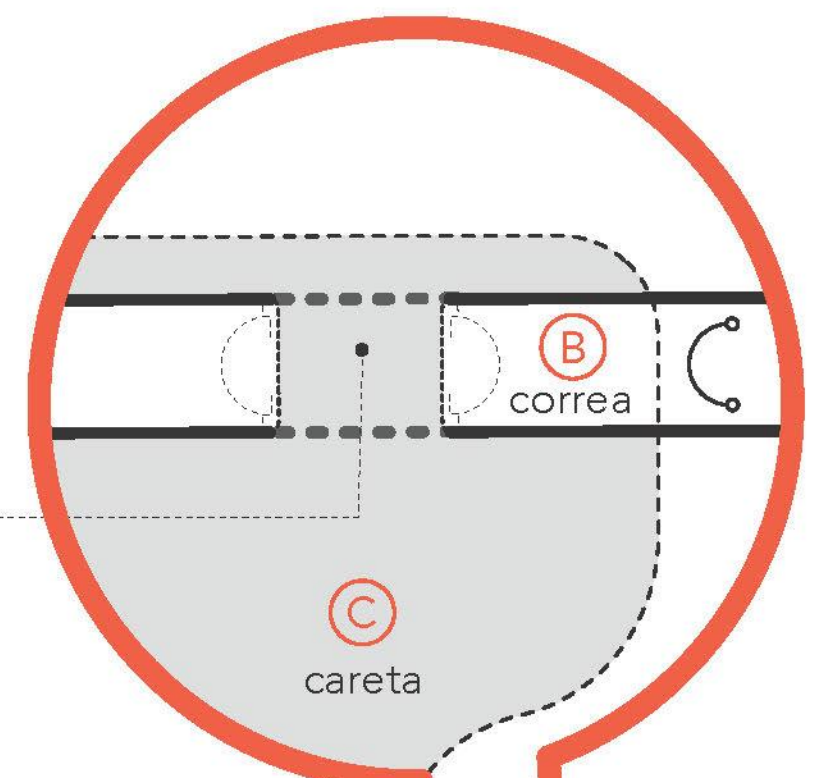

3 Une los extremos de la correa

liga (A)

a) cruza la liga por el orificio

b) cruza la liga por el arco



4 Colócate la careta para protegerte del Covid-19

Existen 3 orificios para fijar y tensar la liga: 2 en la correa y 1 en la careta.

[en caso de romperse uno, puedes utilizar otro]

